

Διεπαφή σύνδεσης διακοπών Switch Interface Pro 5.0

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης

Η συσκευή δέχεται έως και 5 διακόπτες χειρός ή ποδιών στις υποδοχές του.

Για την πλήρη προσομοίωση των λειτουργιών του ποντικιού συνδυάζεται η λειτουργία της συσκευής με:

- Λογισμικό ScanBuddy (σάρωση οθόνης)
- Συσκευή Tracker One (Σύστημα ελέγχου Η/Υ με το κεφάλι)

Το Switch Interface Pro μπορεί να λειτουργήσει με 4 τρόπους οι οποίοι αναγράφονται πάνω στη συσκευή με διαφορετικό χρώμα ο καθένας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσει τον τρόπο λειτουργίας μέσω ενός διακόπτη ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής ανάβοντας κάθε φορά το αντίστοιχο λαμπάκι:

- ✓ **Κόκκινο:** left arrow, right arrow, up arrow, down arrow, Enter
- ✓ **Κίτρινο:** 1, 2, 3, 4, 0
- ✓ **Πράσινο:** Space, Enter, Tab, Shift + Tab, Enter
- ✓ **Μπλε:** Click, Right Click, Double Click, Space, Enter

Το υποέργο **LibAccessATHINA**: «Υποστήριξη ΑμεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράμματος [ΕΠΕΑΕΚ II](#). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Γ' ΚΠΣ.

